

MITOSWAB

INSTRUKCJA POBRANIA PRÓBEK I WYSYŁKI MITOSWAB PLUS

(PRZECZYTAJ CAŁOŚĆ PRZED WYKONANIEM WYMAZU!)


ZESTAW MITOSWAB™ ZAWIERA:

- 4 x Wymazówki do pobrania próbki
- 4 x Małe probówki stożkowe
- 1 x Plastikowa torba z pomarańczowym/czerwonym znakiem BIOHAZARD
- 1 x Formularz zamówienia badania do laboratorium
- 1 x Marker wodoodporny DO PODPISANIA PROBÓWEK
- 1 x Torba termoizolacyjna
- 1 x Wkład mrożący
- 1 x Folia kurierska

NA 24 GODZINY PRZED POBRANIEM MATERIAŁU DO BADANIA MITOSWAB™ ZAMROŹ WKŁAD MROŻĄCY ZNAJDUJĄCY SIĘ W ZESTAWIE. UPEWNIJ SIĘ, ŻE JEST ZAMROŻONY NA PŁASKO. PRZECHOWUJ WKŁAD W ZAMRAŻARCE DO CZASU KIEDY WYMAZY BĘDĄ POBRANE, ZAMROŻONE I GOTOWE DO WYSŁANIA.

JEŚLI TO MOŻLIWE ODSTAW SUPLEMENTY NA 2 DNI PRZED POBRANIEM PRÓBK

- Bezpośrednio przed pobraniem wymazu:
 - Przeplucz jamę ustną czystą wodą. Upewnij się, że nie ma w niej pozostałości jedzenia lub słodczy. Jeśli myłeś zęby - odczekaj 30 minut.
 - Oznacz cztery probówki stożkowe swoim imieniem, nazwiskiem, datą pobrania i ponumeruj je kolejno 1,2,3 i 4 korzystając z dołączonego markera.
 - Pobierz po 2 wymazy z każdej strony jamy ustnej:
 - Ostrożnie otwórz jedno z czterech opakowań wymazówek w miejscu oznaczonym symbolem rąk i wyciągnij wymazówkę z opakowania. (Nie dotykaj końcówki wymazówki - części przypominającej piankę, wacik.) (Ilustracja A).
 - Przyłóż wymazówkę do wewnętrznej strony lewego policzka i delikatnie potrzyj wacikiem przy otwartych ustach przez 30-40 sekund. (Ilustracja B).
 - Umieścić wymazówkę w probówce tak, aby dotykała dna probówki. Odetnij pozostałą część wymazówki nożyczkami i szczelnie zamknij probówkę z próbką wymazu w środku. (Ilustracja C).
 - Używając kolejnej wymazówki, powtórz kroki z a,b i c na wewnętrznej stronie prawego policzka.
 - Używając kolejnej wymazówki, powtórz kroki a,b i c na wewnętrznej stronie lewego policzka.
 - Używając kolejnej wymazówki, powtórz kroki a,b i c na wewnętrznej stronie prawego policzka.
 - Zamroź wszystkie 4 probówki - czas mrożenia to ok. 1 godzina
 - Wypełnij formularz zamówienia badania (TYLKO żółte pola)
- UWAGA:** DATY wpisz w formacie **MM-DD-RR** (SYSTEM USA)

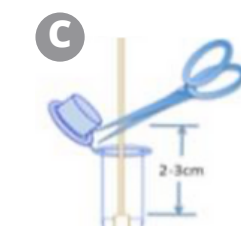

PRZYGOTOWANIE POBRANEGO MATERIAŁU DO WYSYŁKI

Zaaranżuj przyjazd kuriera na dzień wysyłki (poniedziałek) - dostawa do punktu docelowego **musi być następnego dnia do godziny 10:30. Najlepiej wybrać opcje DPD Classic doręczenie do godz. 9:30. Pod tym linkiem możesz zamówić przesyłkę DPD:**

https://nadaj.dpd.com.pl/konto/dodawanie_paczki

Adres do Wysyłki:

InterCityExpress
Maciej Paweł Januchowski
ul. Winogrody 29
61-663 Poznań
tel. 61-833 46 10
24h: 602 57 98 57

***Materiał można dowieźć do InterCity Express
w Poznaniu osobiście**

KROK PO KROKU

KROK 1

Rano w dzień wysyłki przed planowanym podjazdem kuriera lub dowozem do punktu nadania:

- umieść wszystkie cztery zamrożone probówki w torebce z napisem BIOHAZARD.
- W **ZEWNĘTRZNEJ** kieszeni torebki Biohazard umieść **WYPEŁNIONY** formularz pacjenta.
- Umieść zamrożony wkład chłodzący i torebkę BIOHAZARD z wymazówkami w torbie termoizolacyjnej.
- Usuń czerwoną taśmę z wewnętrznej części torby termoizolacyjnej i szczelnie zaklej torbę za pomocą znajdującego się pod taśmą kleju.
- Złóż torbę termoizolacyjną na pół i włóż ją do pudełka.
- Zamknij pudełko i umieść w folii kurierskiej.
- Zaklej folię kurierską.



KROK 2

- Naklej na paczkę etykietę dla kuriera i czekaj na odebranie paczki **lub**
- dowieź paczkę do punktu nadawczego.

